

シューカバー取付器

Art.4490 取付器本体 (PEシューカバー40枚付)

12,000円/セット

サイズ:220×420×140mm

材質:PP・PE

入数:1セット

最少出荷単位:1セット

手を使わずに履ける!



使用方法動画



Art.4491 PEシューカバー (10枚×10)

4,000円/パック 最少出荷単位:1パック



● 1つ10枚束


シューカバーの取付方



① シューカバー (10枚束) を開き T型クリップの間隔の広い方を取付器の長辺に合わせます。



② シューカバーのT型クリップのクリップ結束モールを外さずに取付器のT字口へ挿入します。A

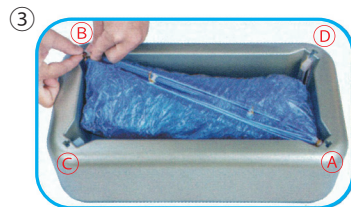


③ ②で取り付けたのと同様に対角BにもT型クリップを挿入します。CとDにも同様に挿入します。



④ 四隅へのT型クリップ挿入後各所の結束モールを外してください。



⑤ 挿入終了後 (40枚まで) それぞれT型クリップを押し下げた後、反動で戻ればセット完了です。

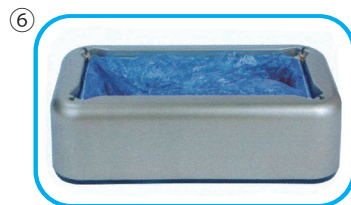

⑥ セット完了後、シューカバーのたわみやズレがないように底面が平滑になるように整えてください。

面白いほどカビが...

スポンジ

シューカバー取付器

衛生用品

取付器の使い方



① シューカバー取付器の中央に足を入れます。



② カチッと音がなるまで踏み込みます。



③ シューカバーが取り付けられているのを確認し足を取り出します。



④ 簡単!これだけ!

爪ブラシ(袋入)

Art.4239

400円/個

最少出荷単位:20個

